

XIOGLICAN™

CREMA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

XIOGLICAN™ Crema è un dispositivo medico in crema per uso topico a base di galattosaminoglicano polisolfato, acido ialuronico ed altri componenti ad elevata attività idratante e lenitiva utile per il ripristino del fisiologico stato della pelle, anche nei casi in cui risulti alterata da patologie circolatorie periferiche o da edemi ed ematomi.

COMPOSIZIONE

Galattosaminoglicano polisolfato, acido ialuronico sale sodico, cetostearil alcol tipo A, trigliceridi a catena media, alcool miristico, isopropile miristato, bentonite, alcool isopropilico, imidazolidinilurea, fenossietanolo, essenza di lavanda, acqua purificata.

INDICAZIONI

XIOGLICAN™ Crema è indicata per la prevenzione ed il trattamento locale delle alterazioni cutanee (distrofie, discromie, xerosi, desquamazione, secchezza), associate anche alla presenza di patologie venose (varici venose, flebiti e tromboflebiti superficiali) e per l'idratazione della cute in tali situazioni.

Trattamento locale degli edemi e degli ematomi indotti da traumi e contusioni superficiali.

MODALITÀ D'USO

Per aprire la prima volta il tubo, perforare la membrana protettiva utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura.

Applicare la crema, in quantità idonea alla superficie di cute da trattare e sulle zone circostanti, generalmente 2-4 cm di crema, massaggiando delicatamente fino al suo completo assorbimento. Non utilizzare sulla cute lesionata.

Ripetere l'applicazione fino a 3 volte al giorno. Chiudere accuratamente il tubo dopo ogni utilizzo.

Proseguire il trattamento sino alla scomparsa della sintomatologia riducendo progressivamente il numero di applicazioni giornaliere. Se la sintomatologia persiste o non si notano miglioramenti dopo 10 giorni di trattamento rivolgersi al medico o al farmacista.

AVVERTENZE

- Il prodotto è per uso esterno, utilizzare solo su cute integra, non va applicato in caso di sanguinamento, su ferite aperte e sulle mucose, nonché su sedi di infezioni e in caso di processi suppurativi.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno o più componenti del prodotto.
- L'uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi è indicato sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.
- In caso di gravidanza, di allattamento o di terapie topiche concomitanti l'impiego deve essere effettuato solo sotto il controllo del medico.
- Non usare il prodotto su bambini di età inferiore ai 14 anni.
- Tenere il prodotto lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- In caso di necessità rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono prevedibili effetti indesiderati associati all'uso del prodotto.
Eventuali effetti indesiderati associati all'utilizzo del dispositivo vanno comunicati al medico o al farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
Il prodotto ha una validità di 6 mesi dopo la prima apertura.
La data di scadenza è riportata sulla confezione.

CONFEZIONE

XIOGLICAN™ Crema è disponibile in confezioni da 50 g di crema in tubo di alluminio.

Data di ultima revisione: 01/2018